

Exactement à l'endroit prévu

## Une vision de loin de qualité grâce à la LIO AcrySof<sup>MD</sup> Toric

Lorsque la courbure de la surface de la cornée n'est pas constante, la vision est déformée. Cette irrégularité fréquente, appelée « astigmatisme cornéen », cause une vision trouble ou une déformation des images, car les rayons lumineux ne se concentrent pas correctement pour donner une vision nette.

La LIO AcrySof<sup>MD</sup> Toric permet en même temps de remplacer le cristallin opacifié et de corriger l'astigmatisme cornéen.

Par sa conception unique, cette LIO réduit ou élimine l'astigmatisme cornéen et améliore notablement la vision de loin non corrigée. Elle assure une vision de loin de qualité, sans lunettes ni lentilles cornéennes.

### Avantages de la LIO AcrySof<sup>MD</sup> Toric -

- Elle réduit ou élimine l'astigmatisme cornéen
- Après implantation bilatérale, 97 % des patients de l'étude approuvée par la FDA voyaient de loin sans lunettes
- Elle est dotée de propriétés de filtration de la lumière similaires à celles du cristallin, arrêtant les rayons UV et la lumière bleue<sup>1</sup>



# Pourquoi la vision normalement nette est parfois déformée

## L'œil normal

La surface de la cornée d'un œil normal est sphérique, c'est-à-dire de forme similaire à celle d'un ballon de basketball. Les rayons lumineux qui la traversent sont déviés vers le fond de l'œil et se concentrent sur la rétine.



*Vision normale*

## Astigmatisme

Parfois, la surface de la cornée a plutôt la forme d'un ballon de football, avec des zones de courbure plus accentuée et d'autres de courbure moins accentuée. Lorsque la courbure de la surface de la cornée est ainsi irrégulière, la vision est déformée. Cette irrégularité fréquente, appelée « astigmatisme cornéen », cause une vision trouble ou une déformation des images, car les rayons lumineux ne se concentrent pas correctement pour donner une vision nette.

Chez une personne présentant à la fois une cataracte et un astigmatisme cornéen, la chirurgie de la cataracte ne rétablit pas une vision de loin de qualité si l'astigmatisme n'est pas corrigé.



*Vision avec astigmatisme*

Référence :  
1. Données internes, Alcon

Fabricant :

**Alcon**<sup>MD</sup>

ALCON LABORATORIES, INC.  
Fort Worth, Texas 76134

[www.alconlabs.com](http://www.alconlabs.com)

[www.cataractsurgery.com](http://www.cataractsurgery.com)

SU061085

Distributeur :

**Alcon**<sup>MD</sup>  
CANADA

Alcon Canada Inc.  
Mississauga, ON L5N 8C7

[www.alconlabs.ca](http://www.alconlabs.ca)